

# EMERGENCE

## Technique opératoire

*Cette technique opératoire a pour but d'assurer la bonne utilisation du matériel ancillaire et faciliter le déroulement de l'intervention. Le chirurgien l'adaptera en fonction de ses habitudes.*

1- Coupe du col selon planification radiologique. Ouvrir le canal à l'aide du ciseau à spongieux.



2- Monter la râpe sur le porte râpe. Râpes taille pour taille.



3- Lorsque la dernière râpe est en place, positionner le col correspondant à la taille retenue puis la tête d'essai afin de vérifier la stabilité et la mobilité de l'articulation, après réduction.



4- Mise en place de l'obturateur diaphysaire et du ciment puis impacter l'implant définitif correspondant à la dernière taille de râpe utilisée à l'aide de l'impacteur orienteur. Retirer l'orienteur durant la prise de ciment.

5- Vérifier le choix de la longueur de tête retenue et mettre en place cette dernière sur le cône. Impacter légèrement à l'aide de l'impacteur réducteur.



L'impacteur réducteur

Fabriqué par Evolutis  
Avenue de la Libération - 42720 BRIENNON  
Tél : 04-77-60-79-99 Fax : 04-77-60-79-90  
E-mail : [evolutis@evolutis42.com](mailto:evolutis@evolutis42.com)

Réduire l'articulation.